

MIROIRS

R&S

MODE D'EMPLOI

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET DE STÉRILISATION

N'utilisez cet instrument que dans le but pour lequel il a été conçu.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'INSTRUMENT

Décontamination avant la 1^{ère} utilisation et immédiatement après utilisation.

NETTOYAGE ET RINCAGE

Nettoyage manuel (recommandé).

L'utilisation d'un thermo-désinfecteur et ultra-son n'est pas recommandé.

Rincage à l'eau claire déminéralisée et séchage (inspection minutieuse).

STÉRILISATION

Emballage pour la stérilisation. Stérilisation en autoclave (18 minutes à 134°C ; 4 minutes à 132°C).

Pour les miroirs dentaires à surface réfléchissante fragile, éviter tout contact avec d'autres instruments au cours de ces procédures.

N'exposez pas les miroirs à une température supérieure à 180°C.

Les miroirs dentaires ont une durée de vie limitée : pas plus de 100 cycles de stérilisation.

MANIPULATION

Pour éviter les rayures sur la surface du miroir causées par d'autres instruments, nettoyez et stérilisez lorsqu'ils sont complètement démontés, et ne les mettez pas en contact avec d'autres instruments.

À NOTER QUE

La décoloration due aux taches d'eau n'est pas un signe de corrosion.



PRODONT HOLLIGER
Groupe ACTEON
3 La Marnasse
63880 Olliergues
France
Tel : +33,04.73.95.56.42
Email : prodont-holliger@acteongroup.com



CADENCE
2 bis, chemin du Loup
93290 Tremblay-en-France - FRANCE